

Gymna ShockMaster

Optimizing your shockwave experience



gymna[®]

gymna.com

Gymna ShockMaster

Maximales Resultat bei minimalem Zeitaufwand

Radiale Stoßwellentherapie

Die ideale Behandlungsmethode bei allen chronischen und komplexen muskuloskelettalen Erkrankungen.

Funktionsprinzip


Ein schnell bewegendes Projektil überträgt seine Energie an den Behandlungskopf. Auf diese Weise werden radiale Stoßwellen erzeugt, die im Körper divergieren und vom behandelten Körperbereich aufgenommen werden.

Resultat

- Schmerzlinderung
- Regeneration des geschädigten Gewebes
- Abbau von Fibrose und Kalzinose

Mehrwert für Ihre Praxis

- Durchschnittlich 6 bis 8 Behandlungssitzungen
- Eine realistische Alternative zur Chirurgie

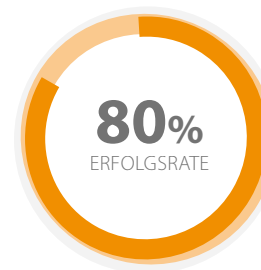

Gymna ShockMaster

Wichtigste Indikationen

Gymna ShockMaster – effizient in der Behandlung von:



Sehnen

Die häufigsten Tendinopathien, die mit radialer Stoßwellentherapie behandelt werden, sind Achillessehnen-, infrapatellare und Supraspinatus-Tendopathien sowie seitliche Ellbogenschmerzen.



Knochen

Die häufigsten Krankheitsbilder bei Knochen sind Stresssyndrom der medialen Tibia und Schmerzen am Trochanter major.



Neurologische Erkrankungen

Die Muskelbehandlung mit der radialen Stoßwellentherapie zur Behandlung von Spastiken sowohl bei post-hemiplegischen Erwachsenen als auch bei Kindern mit Zerebralparese wird allgemein als erfolgreich anerkannt.



Muskeln

Muskelbehandlung an Triggerpunkten, bei Muskelkater und erhöhtem Muskeltonus.



Bindegewebe

Plantare Faszioopathie, schnellender Finger (auch Schnappfinger genannt) und Narbengewebe sind weit verbreitete Anwendungsgebiete für die radiale Stoßwellentherapie.

Gymna ShockMaster 500

Behandlung unter bestmöglichen Voraussetzungen

Die ideale Unterstützung in Ihrer Praxis mit einer Schnittstelle, die einen Schritt weitergeht

Blieben Sie mit der Benutzerschnittstelle auf dem Laufenden

Die Stoßwellentherapie entwickelt sich noch stetig weiter. Durch ständige Aktualisierung der Behandlungssoftware mit den neuesten Erkenntnissen bleiben Sie auf dem Laufenden:

- Die Behandlungsparameter werden anhand der jüngsten Erkenntnisse angepasst
- Es werden stets neue Erkrankungen mit den dazugehörigen Behandlungsprotokollen hinzugefügt.

Darüber hinaus erhalten Sie:

- Realistische Behandlungsfotos zur Unterstützung
- Anatomiebibliothek
- Medizinische Informationen über die mit Stoßwellentherapie zu behandelnden Erkrankungen



Neue Untermenüs: Auf der Grundlage des betroffenen Gewebes



Datenbank der Patienten mit Behandlungsverlauf auf der Grundlage des VAS



Visuelle Darstellung der Behandlungszone mit eventueller Schmerzausstrahlung bei der Behandlung von Triggerpunkten

Benutzerfreundlich

- Ergonomisch geformter Wagen, sämtliches Zubehör ist in Reichweite
- 2 Ausgabekanäle für einfaches und schnelles Umschalten zwischen Handstücken
- Leiser und vibrationsfreier Ölkompessor
- Schnelle Software-Updates über den USB-Port
- Quick start up



Dank der großen Räder schnell und einfach transportabel



Praktisches Kabelaufhängungssystem für Ihre Handstücke



Geordnetes Zubehör durch vorgeformte Schubladeneinteilung

Gymna ShockMaster 300

Stoßwellentherapie - jederzeit, überall

Mobilität dank des kompakten Formats

Mobil

- Kleines und leichtes Gerät
- Maßgeschneiderte Tragetasche zur Erleichterung von Transport und Gebrauch
- Geräuscharmer Druckluftkompressor



Einzigartiges patientengeführtes Therapiesystem

- Plug & Play
- Leuchtleiste: Behandlungsdauer
- Praktische Checkliste für Gegenanzeigen

Gymna ShockMaster

Stimmen Sie Ihre Behandlung entsprechend dem Zustand Ihres Patienten genau ab.

1 Bewertung des Zustands des Patienten mit GTS

Das intelligente patientengeführte Therapiesystem von Shockmaster (patient Guided Therapy System) passt den Grad der Behandlung automatisch an den Zustand Ihres Patienten an.

2 Behandlung des betroffenen Bereichs

Wählen Sie den geeigneten Applikator unter Berücksichtigung von Krankheitsbild und Tiefe, beginnen Sie Ihre Standard-Behandlung auf der Grundlage Ihres pGTS-Ergebnisses.

3 Behandlung der entsprechenden Trigger-Punkte

Wechseln Sie erforderlichenfalls den Applikator und behandeln Sie die entsprechenden Trigger-Punkte.

4 Behandlung zur Muskellockerung

Behandlung von Muskelverspannung, Verbesserung der Durchblutung und Entspannung von Trigger-Punkten mit dem D-Actor.

5 Stimulation der Stoffwechselaktivität

Anregung der Stoffwechselaktivität und Eliminierung von Toxinen, Verbesserung der Mikrozirkulation und Erreichen einer Muskelentspannung mit dem V-Actor.



Gymna ShockMaster

Die beste Unterstützung und Erweiterung für Ihre Praxis

Gymna ShockMaster bedeutet Unterstützung, Fachwissen und Benutzerfreundlichkeit. Diese Geräte bieten dem Therapeuten:



Wissen & Erfahrung

- Gerät auf dem neuesten Stand mit der aktuellsten Behandlungssoftware auf der Grundlage von Fachwissen und evidenzbasierten Untersuchungen



Breiterer Anwendungsbereich

- Ständig werden neue Behandlungen hinzugefügt
- Sportindikationen
- Schnelleres Resultat durch zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten



Mehr Patienten mit schnelleren Ergebnissen

- Mehr Patienten kommen für Stoßwellentherapie in Betracht
- Ihre Patienten befinden sich schneller wieder auf Aktivitätsniveau
- Ein Anreiz für einen weiteren Ausbau Ihrer Praxis



Eine Investition, die sich wirklich lohnt



Gymna ShockMaster

Optimizing your shockwave experience



Kryotherapie



Diathermie



Stoßwellentherapie



Physio Care



Behandlungsliegen



Elektrotherapie



Active Motion



Ihr Händler:

gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel DE: 0180 22 52 345 | Tel AT: +43 800 700 208