

## Gesichts-Gelkissen oval



### **Gesichts-Gelkissen oval:**

Das Gesichts-Gelkissen, ca. 29 x 23 cm, verringert Druckstellen im Gesicht des Kunden und dient dazu, für die Zeit der Behandlung ein komfortables Liegen zu ermöglichen. Das angenehme, weiche Gelmaterial passt sich dabei der Gesichtform des Kunden an und ermöglicht ihm so ein entspanntes Liegen während der Behandlung. Das Gesichts-Gelkissen ist abwaschbar und desinfizierbar. Zur Desinfektion eignet sich gut ein sanftes Desinfektionsmittel, welches auch für Behandlungsliegen geeignet ist (kein Desinfektionsreiniger für die Flächendesinfektion verwenden!). Zur hygienischen Anwendung empfehlen wir die zusätzliche Benutzung von Gesichtsauflagen, bzw. Nasenschlitztüchern.

### **Bestandteile und Inhaltsstoffe:**

Das Gesichts-Gelkissen besteht aus einer transparenten EVA-Folie (Ethylen-Vinyl-Acetat) und einer Füllung aus transparentem Gel-Material.

### **Anwendungshinweise:**

Das Gesichts-Gelkissen ist stets pfleglich zu behandeln. Vor dem Gebrauch ist das Gesichts-Gelkissen immer auf Dichtheit zu prüfen. Es ist nicht dazu geeignet, im Wasserbad oder in der Mikrowelle erwärmt zu werden. Ebenso ist das Gesichts-Gelkissen nicht für das Gefrierfach geeignet.

### **Sicherheitshinweise:**

Bei Beschädigung der PVC-Hülle des Gesichts-Gelkissens ist dieses nicht weiter zu verwenden. Eine Aufnahme des Gel-Materials in oraler Form ist unbedingt zu vermeiden. Sollte es doch zu einer oralen Aufnahme des Gel-Materials kommen, unbedingt sofort einen Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt mit dem Gel-Material die Augen unbedingt gut spülen und ebenfalls einen Arzt aufsuchen. Das Gesichts-Gelkissen ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

**Gewährleistung:** 6 Monate